

## Instrukcja pobierania materiału na karty FTA

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów kart FTA do różnych celów. My natomiast zalecamy używanie klasycznych lub z indykatorem kart FTA z firmy Whatmann lub Qiagen. Umożliwiają one utrwalenie i ustabilizowanie kwasów nukleinowych, a także bezpieczny transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Nieużywane karty należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Podczas pracy z FTA należy zawsze używać jednorazowych rękawiczek aby uniknąć zanieczyszczenia karty.

Próbka do nałożenia na kartę FTA nie powinna być całkowicie sucha, ponieważ wiązanie z kartą FTA jest skuteczne tylko wtedy gdy wilgotna próbka może wnikać w kartę. Karty FTA można stosować do próbek tkanek lub wymazów.

Aby odpowiednio nałożyć wymazówkę należy nią bezpośrednio nacisnąć (nie trzeć, ani nie rozmazywać) na kartę FTA. Po nałożeniu materiału pozostaw próbki do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewać, nie suszyć mechanicznie.

W celu bezpiecznego transportu umieść wysuszoną oraz opisaną kartę FTA w zamkniętym woreczku strunowym i następnie włóż do koperty wraz z wypełnionym zleceniem do badań,